


ESENTA™ sprej i maramice za uklanjanje medicinskog adheziva bez iritacije


Proizvodi na bazi silikona

Atraumatsko i brzo uklanjanje adhezivnih medicinskih sredstava (obloga za rane, flasteri, stoma pomagala...)


Primena ESENTA™ spreja za uklanjanje medicinskog adheziva bez iritacije:

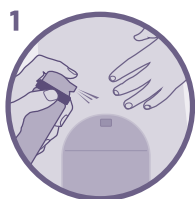

Naprskajte sprej oko ivica samog adhezivnog sredstva i sačekajte nekoliko sekundi. Možete naprskati iz bilo kog ugla.

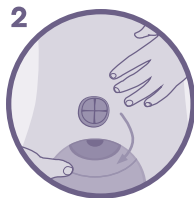

Nežno odstranite adhezivno sredstvo koristeći i dodatne količine spreja ukoliko je to potrebno.

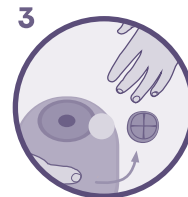


Kada se osuši, ESENTA™ sprej neće uticati na adhezivnost stoma pomagala, obloga za rane ili flastera.


Primena ESENTA™ maramica za uklanjanje medicinskog adheziva



Otvorite kesicu i izvadite maramicu.

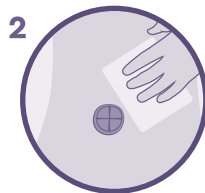

Protrljajte (obrišite) površinu kože sa koje želite da uklonite ostatke adheziva.

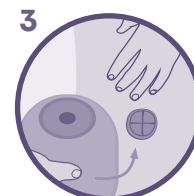

Nakon sušenja, ESENTA™ maramice za uklanjanje medicinskog adheziva ne utiču na adhezivnost stoma pomagala, obloga za rane ili flastera.

ESENTA™ za zaštitu kože bez iritacije

OBLIK	ZAPREMINA/KOLIČINA	KATALOŠKI BROJ
Sprej	50 ml	423288
Maramica	30 komada	423282

Broje rešenja o registraciji: 515-02-04704-23-003 od 17.11.2023.

ESENTA™ za uklanjanje adheziva bez iritacije

OBLIK	ZAPREMINA/KOLIČINA	KATALOŠKI BROJ
Sprej	50 ml	423289
Maramica	30 komada	423281

Broj rešenja o registraciji: 515-02-04703-23-003 od 17.11.2023.

TT MEDIK

Ovlašćeni predstavnik proizvođača: TT Medik, d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10D/I, 11070 Novi Beograd
Tel: 011 311 5152, e-mail: office@ttmedik.co.rs, www.ttmedik.co.rs



ESENTA™

Besplatna telefonska linija:
0800 101 102

 **convatec**
— forever caring —